

ACCU-CHEK® Aviva Nano

(FR)


Pour commencer

Guide de démarrage

AVERTISSEMENT
Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie Accu-Chek Aviva Nano. Le manuel d'utilisation fournit des consignes importantes à respecter en termes de manipulation ainsi que d'autres informations.

AVERTISSEMENT
L'autopiqueur est réservé exclusivement à l'usage personnel.

ACCU-CHEK®

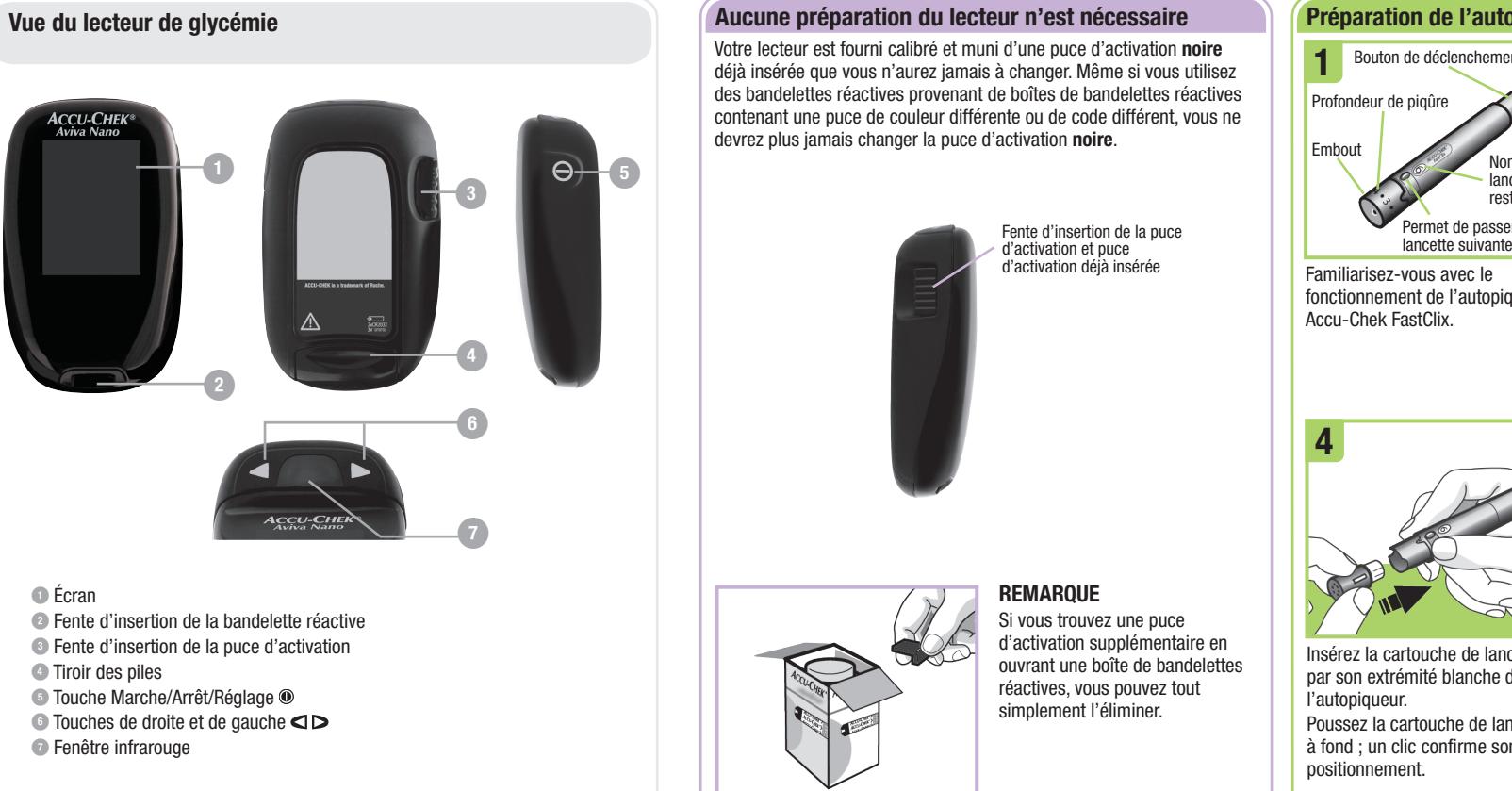

Aucune préparation du lecteur n'est nécessaire

Votre lecteur est fourni calibré et muni d'une puce d'activation **noire** déjà insérée que vous n'aurez jamais à changer. Même si vous utilisez des bandelettes réactives provenant de boîtes de bandelettes réactives contenant une puce de couleur différente ou de code différent, vous ne devrez plus jamais changer la puce d'activation **noire**.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous de ne pas introduire la cartouche de lancettes dans les messages d'erreur suivants.
E-1 La bandelette réactive est peut-être endommagée ou mal insérée. Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est endommagée.
E-2 Ce n'est pas la bonne puce d'activation. Éteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce d'activation. Si vous avez besoin d'une puce d'activation, contactez Roche.
E-3 Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou qu'un résultat correspond à votre état de santé, contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat ne correspond pas à votre état de santé, recommencez la mesure de glycémie. Reportez-vous au chapitre 2, Résultats glycémiques inhabituels, du manuel d'utilisation. Si le message E-3 s'affiche de nouveau après votre mesure de glycémie, votre résultat glycémique peut être extrêmement élevé et supérieur à l'intervalle de mesure du système. Contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat de la deuxième mesure de glycémie ne correspond pas à votre état de santé, effectuez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat de ce test de contrôle se situe dans l'intervalle acceptable, assurez-vous que vous avez bien suivi les différentes étapes de réalisation de la mesure de glycémie et recommencez la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat de ce test de contrôle se situe hors de l'intervalle acceptable, reportez-vous au chapitre 4, Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable, du manuel de l'utilisation.

REMARQUE
Si vous trouvez une puce d'activation supplémentaire en ouvrant une boîte de bandelettes réactives, vous pouvez tout simplement l'éliminer.

Préparation de l'autopiqueur

1 Bouton de déclenchement
2 Profondeur de piqûre
3 Embout
4 Nombre de lancettes restantes
5 Fente d'insertion de la puce d'activation et puce d'activation déjà insérée

REMARQUE
Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes stériles.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous de ne pas introduire la cartouche de lancettes dans les messages d'erreur suivants.
E-7 Une défaillance électronique s'est produite ou, ce qui est rare, une bandelette réactive usagée a été retirée du lecteur et réinsérée. Éteignez le lecteur puis rallumez-le ou retirez les piles pendant 20 secondes et réinstallez-les. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.
E-8 La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de températures préconisé, attendez 5 minutes et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.
E-9 Les piles sont presque à plat. Remplacez les piles maintenant. Si le message s'affiche de nouveau après le remplacement des piles, appuyez sur l'écran et l'heure clignote.
E-10 Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

Réglage de l'heure et de la date sur le lecteur

1 Appuyez brièvement sur la touche **①**. Le lecteur émet un signal sonore, l'indication **set-up** (réglage) s'affiche à l'écran et l'heure clignote.
2 Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes stériles.
3 Retirez l'embout en tirant dessus. Ne placez pas l'autopiqueur de sorte que son bouton de déclenchement soit appuyé sur une table par exemple. L'autopiqueur risquerait de libérer une lancette et d'occasionner des blessures par inadvertance.
4 Insérez la bandelette réactive dans le lecteur en respectant le sens des flèches jusqu'à ce que le lecteur émette un signal sonore. Le code s'affiche brièvement, le lecteur émet un signal sonore et le symbole d'une goutte de sang clignote s'affiche.

REMARQUE
Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix.

Lorsque vous êtes prêt pour la mesure...

5 Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté de l'extrémité du doigt et enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'au moment où le levier vers l'avant puis en coulissant le levier vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

REMARQUE
Ne retirez pas la cartouche de lancettes tant que les 6 lancettes n'ont pas été utilisées ; il n'est en effet pas possible de la réemployer une fois extraite de l'autopiqueur.

Réalisation d'une mesure de glycémie

6 Mettez la goutte de sang obtenue en contact avec l'extrémité de la lancette pour réduire au minimum la sensation d'inconfort. Faites avancer la lancette suivante en faisant déposer une quantité suffisante de sang sur le dessus de la partie saillante de la bandelette réactive. Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

REMARQUE
Réglez la profondeur de piqûre : appuyez sur le bouton de déclenchement jusqu'au moment où le levier vers l'avant puis en coulissant le levier vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

Et avant de terminer...

7 Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie ou de solution de contrôle : appuyez sur le bouton de déclenchement jusqu'au moment où le levier vers l'avant puis en coulissant le levier vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

REMARQUE
Appuyez brièvement sur la touche **ou ▷** pour régler l'heure. Appuyez brièvement sur la touche **①** pour afficher la date. Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

MISE À JOUR : 2014-05

CE 0088

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO et FASTCLIX sont des marques de Roche.

© 2015 Roche Diabetes Care
06647677001(02)-1015

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

Roche USA – 53907
V4/1 – 06647677001(02) – Black

Roche USA – 53907
V4/2 – 06647677001(02) – Cyan

Roche USA – 53907
V4/3 – 06647677001(02) – Magenta

Roche USA – 53907
V4/4 – 06647677001(02) – Yellow

ACCU-CHEK® Aviva Nano

NL

Begin hier

Beknopte gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING
Deze beknopte gebruiksaanwijzing dient niet als vervanging van de gebruiksaanwijzing van uw Accu-Chek Aviva Nano-bloedglucosemeter. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen voor de bediening en aanvullende informatie.

WAARSCHUWING
De prikken is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

ACCU-CHEK®



Geen voorbereiding van de meter noodzakelijk

Uw meter is al gecodeerd en bevat een **zwarte activatiechip**, die u nooit hoeft te vervangen. Zelfs als u teststrips gebruikt uit verpakkingen die een andere chip, ofwel met een andere kleur of een ander codenummer, bevatten hoeft u de **zwarte activatiechip** nooit meer te vervangen.

WAARSCHUWING
U mag de lancettenhouder niet in de prikken schuiven en gelijktijdig op de prikken drukken of de prikken met de prikknop op een oppervlak, zoals b.v. een tafelblad, laten rusten. Hierdoor zou er een lancet kunnen worden ontspannen en ongewild letsel kunnen veroorzaken.

OPMERKING
Iedere lancettenhouder bevat 6 steriele lancetten.

Instellen van de prikken

1 Prikdiepte
Dopje
Beschikbare aantal lancetten
Hendeltje voor volgende lancet

2 Neem de lancettenhouder uit het zakje in het etui.

3 Verwijder het dopje door dit recht van de prikken af te trekken. Het dopje niet van de prikken.

4 Maak uzelf vertrouwd met de Accu-Chek FastClix-prikken.

WAARSCHUWING
Was uw handen en droog ze goed af, voordat u een bloedglucosemeting uitvoert.

OPMERKING
Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Sluit de flacon direct na gebruik weer goed af met de dop.

5 Druk kort op (A). De meter geeft een akoestisch signaal en set-up en de knipperende uurweergave worden op de display weergegeven.

6 Druk kort op (D) om het aantal uren te passen. Druk kort op (A) om de uren, minuten, dag, maand en jaar te verplaatsen, waarbij iedere knipperende instelling zo nodig met (A) of (D) kan worden aangepast.

WAARSCHUWING
E-7 Er is een elektronische storing opgetreden of er is, in zelden voorkomende gevallen, een gebruikte teststrip verwijderd en opnieuw in de meter geplaatst. Zet de meter uit en weer aan of verwijder de batterijen 20 seconden en plaats deze hierna weer terug. Voer een bloedglucosemeting of een functiecontrole-meting uit.

OPMERKING
E-8 De temperatuur ligt boven of beneden het juiste bereik van het systeem. Raadpleeg de bijsluiter van de verpakking teststrips voor de condities voor het gebruik van het systeem. Ga naar een ruimte met de juiste condities, wacht 5 minuten en herhaal de bloedglucose- of functiecontrolemeting. Probeer de meter niet versnellend op te warmen of af te koelen.

WAARSCHUWING
E-9 De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen onmiddellijk. Als de batterijenhouder uit de meter schuiven, op een willekeurige toets van de meter drukken en de batterijenhouder vervolgens weer terug op zijn plaats brengen.

OPMERKING
E-10 De instellingen van tijd en datum kunnen onjuist zijn. Controleer of de tijd en de datum juist zijn ingesteld en pas deze zonodig aan.

Uitvoeren van een bloedglucosemeting

1 Was uw handen en droog ze goed af, voordat u een bloedglucosemeting uitvoert.

2 Druk kort op (A). De meter geeft een akoestisch signaal en set-up en de knipperende uurweergave worden op de display weergegeven.

3 Neem contact op met Roche, als de foutmelding opnieuw verschijnt.

4 Druk kort op (D) om het aantal uren te passen. Druk kort op (A) om de uren, minuten, dag, maand en jaar te verplaatsen, waarbij iedere knipperende instelling zo nodig met (A) of (D) kan worden aangepast.

5 Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de prikknop te drukken, wordt de prikpen gespannen en wordt er met 1 klik in uw vinger geprikt.

6 Houd het uiteinde van de teststrip tegen de bloeddruppel. Breng geen prikpen gereed voor de volgende meting. Beweeg het hendeltje eenmaal heen en weer om het volgende lancet gereed te maken. Het weergavevenster laat het aantal nog beschikbare lancetten zien.

WAARSCHUWING
E-4 Er is voor een meting niet voldoende bloed of controleoplossing in de teststrip opgezogen of het monster is na het begin van de meting opgezogen.

OPMERKING
E-5 Deze melding kan verschijnen als er een witte codechip in de meter wordt gebruikt. De melding betekent, dat de witte codechip van een vervallen charge (lot) teststrips is. Zet de meter uit en plaat een zwart activatiechip. Zorg ervoor, dat tijd en datum correct in de meter zijn ingesteld.

WAARSCHUWING
E-6 Het bloed of de controleoplossing was al door de teststrip opgezogen, voordat het knipperende druppelsymbool op de display was weergegeven. Gooi de teststrip weg en herhaal de bloedglucose- of functiecontrolemeting.

Foutmeldingen

E-7 Er is een elektronische storing opgetreden of er is, in zelden voorkomende gevallen, een gebruikte teststrip verwijderd en opnieuw in de meter geplaatst. Zet de meter uit en weer aan of verwijder de batterijen 20 seconden en plaats deze hierna weer terug. Voer een bloedglucosemeting of een functiecontrole-meting uit.

E-8 De temperatuur ligt boven of beneden het juiste bereik van het systeem. Raadpleeg de bijsluiter van de verpakking teststrips voor de condities voor het gebruik van het systeem. Ga naar een ruimte met de juiste condities, wacht 5 minuten en herhaal de bloedglucose- of functiecontrolemeting. Probeer de meter niet versnellend op te warmen of af te koelen.

E-9 De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen onmiddellijk. Als de batterijenhouder uit de meter schuiven, op een willekeurige toets van de meter drukken en de batterijenhouder vervolgens weer terug op zijn plaats brengen.

E-10 De instellingen van tijd en datum kunnen onjuist zijn. Controleer of de tijd en de datum juist zijn ingesteld en pas deze zonodig aan.

OPMERKING
Neem contact op met Roche, als de foutmelding opnieuw verschijnt.

DATUM VAN UITGIFTE: 2014-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO en FASTCLIX zijn merken van Roche.

© 2015 Roche Diabetes Care
06647677001(02)-1015