

Een nieuwe testcassette in de meter plaatsen wanneer de 50 testen opgebruikt zijn




Schuif het afdekkapje zo ver mogelijk open.



Druk de ontgrendelingsknop voor het deksel van het cassettecompartiment naar boven.



Haal de gebruikte testcassette uit de meter.

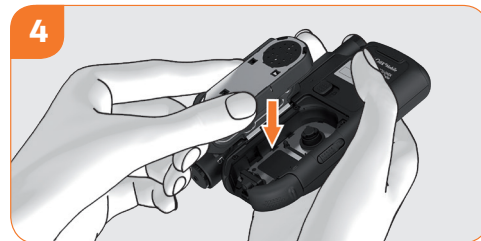

Plaats de nieuwe testcassette in de meter. Sluit het deksel van het cassettecompartiment en het afdekkapje van het testveld.

Een nieuwe lancettenhouder plaatsen wanneer de 6 lancetten gebruikt zijn



Verwijder het dopje en de gebruikte lancettenhouder.



Schuif een nieuwe lancettenhouder, met het witte uiteinde eerst, in de prikker en plaats het dopje terug.



Draai het dopje tot de gewenste prikdiepte op de markering staat. Begin met een gemiddelde prikdiepte, bijvoorbeeld 3.



Zet een nieuw lancet klaar voor gebruik door het hendeltje in richting ① te duwen en vervolgens weer in richting ②.

Stripvrij, eenvoudig, slim.



4 eenvoudige stappen
om je bloedglucose te meten.



4 eenvoudige stappen om een meting uit te voeren



Schuif het afdekkapje open. De meter wordt automatisch aanzet.



Prik in je vinger, zodat er een bloeddruppel verschijnt.



Breng de bloeddruppel voorzichtig en met vaste hand, **in het midden** van het testveld aan. Druk het testveld niet tegen je vinger.




Lees het resultaat af en schuif het afdekkapje toe. De meter wordt uitgeschakeld.


4 basisregels voor een correcte meting



Was je handen met warm water en zeep, spoel ze zorgvuldig af en droog ze grondig af met een propere handdoek.

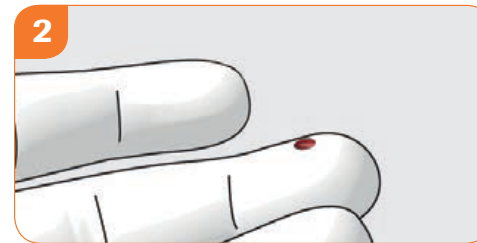

Gebruik altijd een kleine, **goed gevormde** bloeddruppel. Laat de druppel niet uitlopen.

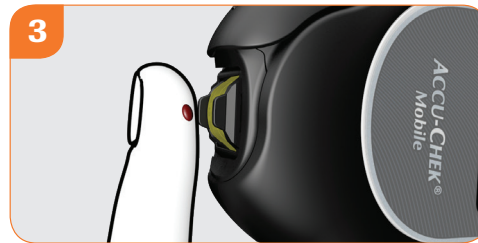

Positioneer de meter zodanig dat je het testveld kan zien wanneer je bloed aanbrengt. Plaats je vinger voorzichtig tegen de afstandhouders zodat alleen de bloeddruppel in contact komt met het midden van het testveld. Hou je vinger zo stil mogelijk.



Breng de bloeddruppel onmiddellijk aan. Haal je vinger weg zodra het bericht 'Meting loopt' weergegeven wordt op het scherm en je een geluidssignaal hoort (indien ingesteld).

Onze Accu-Chek® Service medewerkers staan voor je klaar!



Wij blijven tot je beschikking voor meer informatie over de Accu-Chek® producten en diensten.

- Het gebruik
- Algemene productinformatie
- Antwoord op je vragen

Je kan ons bereiken via het gratis nummer 0800 93 626, van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 17u00. Het is eenvoudig en snel.

Surf naar
www.accu-chek.be

Koop nu eenvoudig je producten online
www.mydiabetescare.be

Bel de Accu-Chek® Service
0800 93 626

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/accuchekbe

Bekijk de video's op
www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, CLIXMOTION en FASTCLIX zijn handelsmerken van Roche. © 2018 Roche Diagnostics



Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK®

Alleen bij een foutloze uitvoering van de meting zijn de resultaten correct en kunnen juiste aanbevelingen worden gedaan voor de behandeling. Volg deze instructies daarom nauwlettend.